



cefar rehab^{x2}



BRUKSANVISNING – SVENSKA

INNAN DU ANVÄNDER STIMULATORN

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1. INLEDNING | 164 |
| 2. MEDICINSK INFORMATION..... | 165 |
| 3. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER | 166 |

INFORMATION TILL PATIENTER

| | |
|---|-----|
| 4. ÖVERSIKT | 167 |
| FUNKTIONSKNAPPAR | 167 |
| DISPLAYSYMBOLER..... | 168 |
| 5. PRAKTISK ANVÄNDNING | 169 |
| STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING | 169 |
| CEFAR EASY TOUCH™ - STIMULERINGSLÄGE AUTO | 171 |
| SÅRSKILDA INSTRUKTIONER | 172 |
| TIMER | 173 |
| PROGRAMPAUS..... | 173 |
| 6. BYTA BATTERIER..... | 174 |

INFORMATION TILL SJUKVÅRDSPERSONAL

| | |
|--|-----|
| 7. PROGRAM | 175 |
| FÖRINSTÄLLDA PROGRAM | 175 |
| PERSONLIGA PROGRAM | 179 |
| PROGRAMLÄS..... | 183 |
| INAKTIVERA/AKTIVERA AUTOFUNKTIONEN | 183 |
| COMPLIANCE..... | 183 |

YTTERLIGARE INFORMATION

| | |
|-------------------------|-----|
| 8. TILLBEHÖR..... | 184 |
| 9. SKÖTSELRÅD | 184 |
| 10. FELSÖKNING..... | 185 |
| 11. VANLIGA FRÅGOR..... | 186 |
| 12. TEKNISKA DATA..... | 188 |
| TECKENFÖRKLARINGAR..... | 189 |

BILAGA

| | |
|--------------------|-----|
| KLINISK GUIDE..... | 190 |
|--------------------|-----|



Nivå 1

**INTERMITTENT
(I)**

Nivå 2

**SIMULTAN
(SI)**

**ALTERNERANDE
(ALT)**

Nivå 3

**Conventional
(C)**

**Frekvens-
modulerad
(FM)**

Pulsbredd
Förinställd: 180 µs
Intervall: 50-400 µs

Pulsbredd
Förinställd: 180 µs
Intervall: 50-400 µs

Pulsbredd
Förinställd: 180 µs
Intervall: 50-400 µs

Frekvens arbete
Förinställd: 80 Hz
Intervall: 1-120 Hz

Frekvens arbete 1
Förinställd: 5 Hz
Intervall: 2-120 Hz

Frekvens arbete
Förinställd: 80 Hz
Intervall: 1-120 Hz

Frekvens vila*
Förinställd: 0 Hz
Intervall: 0-10 Hz

Frekvens arbete 2
Förinställd: 15 Hz
Intervall: 2-120 Hz

Tid arbete
Förinställd: 3 s
Intervall: 1-30 s

Tid arbete
Förinställd: 3 s
Intervall: 1-30 s

Frekvens vila*
Förinställd: 0 Hz
Intervall: 0-10 Hz

Upptärningstid arbete
Förinställd: 2 s
Intervall: 0-10 s***

Tid vila
Förinställd: 10 s
Intervall: 5-60 s

Tid arbete
Förinställd: 5 s
Intervall: 5-30 s

Nedtrappningstid arbete
Förinställd: 2 s
Intervall: 0-10s***

Upptärningstid arbete
Förinställd: 2 s
Intervall: 0-10 s***

Tid vila
Förinställd: 10 s
Intervall: 5-60 s

Tid vila**
Förinställd: 10 s
Intervall: 5-60 s

Nedtrappningstid arbete
Förinställd: 2 s
Intervall: 0-10 s***

Upptärningstid arbete
Förinställd: 2 s
Intervall: 0-10 s***

Tid
Förinställd: - - min.
Intervall: 1-99, - - min.

Tid
Förinställd: - - min.
Intervall: 1-99, - - min.

Nedtrappningstid arbete
Förinställd: 2 s
Intervall: 0-10 s***

Tid
Förinställd: - - min.
Intervall: 1-99, - - min.

* Frekvens mellan 1 och 5 Hz ⇒ Burst-stimulering.
Övrig frekvens ⇒ Conventional-stimulering.

** Tid vila måste vara längre än
tid arbete + upptärningstid arbete + nedtrappningstid
arbete.

***0,5 s visas som 05 i displayen.



CE 0473  DJO FRANCE
Centre Europeen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre, France



⁺
MOTION IS MEDICINE⁺