

DONJOY[®]

BRUKSANVISNING

X-ROM
POST-OP ORTOS



Läs följande anvisningar noggrant och fullständigt innan du använder produkten. Korrekt applicering är av största vikt för produktens korrekta funktion.

Bruksanvisning:

Bild 1

Öppna upp och placera ortosen på en plan yta.

Bild 2

Ställ in leden enligt läkarens ordination och lås den med hjälp av den röda knappen för att underlätta applikation av ortosen.

Bild 3

Anpassa längden på ortosen efter patientens ben, se till att ha samma inställning på båda sidorna. Notera att det går att flytta samtliga (4) remplattor för att undvika tryck på operationssåret och/eller peroneusnerven och få en individanpassad passform.

Bild 4

Placera benet i ortosen. Ortosens leder ska vara i linje med mitten på knäskålen (se referenslinje).

Bild 5

Öppna den grå fliken, spänn remmarna på baksidan och placera sidostagen centrerat på benet. Säkra genom att stänga den grå fliken.

Bild 6 och 7

Spänn remmarna enligt ordningen på bilden och haka fast spännena.

Bild 8 och 9

Vid behov, klipp remmarna till önskad längd och fäst med hjälp av krokodilbanden.

Bild 10 och 11

Nu är utprovningen klar. Utvärdera passformen och gör eventuella slutjusteringar. Sträva alltid efter kontakt mellan ortos och knä. Sidostagen kan bockas till vid behov för individuell anpassning. Se baksidan av broschyren för detaljer.

Bild 12




Glöm inte att låsa upp leden med den röda knappen om patienten tillåts ledrörlighet.

Avsluta med att be patienten resa sig och efterspänn remmarna vid behov.



Patienten kommer endast behöva använda spännena vid av- och påtagning.



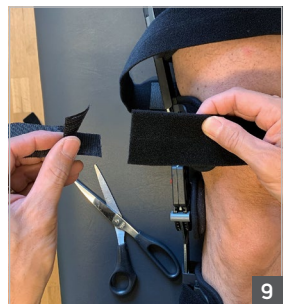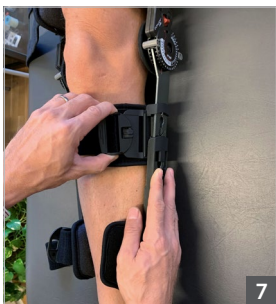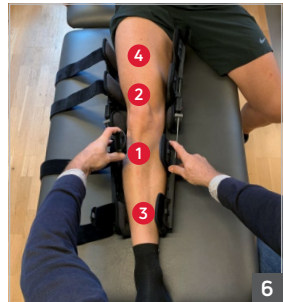

Justering av led och ortos:

- Patienten skall ej justera rörelseomfånget på egen hand – detta skall göras tillsammans med läkare eller sjukgymnast.
- Ledstagen kan böjas så att de formas efter varus eller valgus (se bild 11). Böj varje enskilt stag genom att hålla lår/vadstaget med fast hand mot en stabil yta och applicera försiktigt och konstant tryck mot leden i önskad riktning. För att underlätta appliceringen efter operationen är det bäst om ortosen provas ut före ingreppet.

Rembyte:

Om remmarna måste bytas ut klipper du försiktigt bort remmen med en sax där den ansluts till skenan. För in den nya remmen och fäst fast. Kontakta ENOVIS för en X-ROM remsats.

Tvättråd:

- Handtvätta skumfodret i vatten (30 °C) med ett mildt tvättmedel. Skölj noga. Får endast LUFTTORKAS. Värmetorka ej.
- Regelbunden rengöring av ortosen rekommenderas.
- Kontrollera regelbundet att det inte förekommer främmande material i ortosens leder (som t.ex. smuts). Ta försiktigt bort smuts från ortosens leder med hjälp av vatten eller tryckluft.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Om du känner smärta, svullnad, känsel förändringar eller ovanliga reaktioner när du använder denna produkt ska du omedelbart kontakta läkare.
- Rådfråga alltid läkare eller sjukgymnast innan du utför några ändringar på ortosen.