

cefar[®] femina

 BRUKSANVISNING.....199



BRUKSANVISNING – SVENSKA

INNAN DU ANVÄNDER STIMULATORN

1. INTRODUKTION.....	200
2. MEDICINSK BAKGRUND.....	201
3. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	202

ANVÄNDAR INFORMATION

4. ÖVERSIKT	206
FUNKTIONSKNAPPAR.....	206
DISPLAYSYMBOLER.....	207
5. DRIFT	208
STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING – PROGRAM 1 MED HANDOMKOPPLARE.....	208
STEG-FÖR-STEG-ANVÄNDNING – PROGRAM 2-5.....	210
TIMER.....	211
PROGRAMPAUS.....	211
6. BATTERIBYTE	212
7. PROGRAMGUIDE	213

ÖVRIG INFORMATION

8. TILLBEHÖR.....	215
9. SKÖTSELRÅD	216
10. FELSÖKNING	217
11. VANLIGA FRÅGOR.....	218
12. TEKNISK DATA.....	219
TECKENFÖRKLARINGAR	220
13. ELEKTRODPLACERINGSGUIDE	SE OMSLAGET
14. TABELLER FÖR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC).....	221
15. REFERENSER.....	225



1. INTRODUKTION

Grattis till valet av **CEFAR FEMINA**, den nya stimulatorn som är specialkonstruerad för gravida kvinnor! Du kan använda CEFAR FEMINA före, under och efter förlossningen. CEFAR FEMINA hjälper dig att ta hand om dig själv under den här viktiga delen av livet.

AVSEDD ANVÄNDNING:

TENS är en välkänd metod, baserad på klinisk forskning, och används av medicinskt utbildad personal över hela världen. **CEFAR FEMINA (1835)** ger smärtlindning under graviditeten, förlossningen och tiden efteråt, på ett säkert och naturligt sätt.

Ytterligare information om TENS, EMS och CEFAR-produkter hittar du på vår webbplats:
www.cefarcplex.com.

AVSEDD ANVÄNDARE:

Användaren av CEFAR FEMINA kan vara sjukvårdspersonal eller en patient. Enheten ska användas inomhus och kan användas på en sjukvårdsinstitution eller i hemmet.



- **Försiktighet!** Utför aldrig en första stimulerings-session på en person som står upp. De första fem minuterna av stimulering måste alltid utföras på en person som sitter eller ligger ned. I sällsynta fall kan personer med nervös läggning erfaras en vasovagal reaktion. Denna reaktion kan kopplas till rädsla för muskelstimuleringen samt överraskningsmomentet då patienten ser att en muskel dras samman utan att patienten själv medvetet har utfört sammandragningen. En vasovagal reaktion gör att hjärtat slår långsammare och blodtrycket sjunker, vilket kan göra att du känner dig svag och svimmar. Om detta sker ska du avbryta stimuleringen och lägga dig ned med benen i högläge tills svaghetskänslan går över (5–10 minuter).
- **Försiktighet!** Plötsliga temperaturförändringar kan orsaka att kondensation bildas inuti stimulatorn. För att undvika detta, se till att den uppnår rumstemperatur före användning.




14. TABELLER FÖR ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Riktlinjer och tillverkarens deklARATION - Elektromagnetisk immunitet		
<p>CEFAR FEMINA-elektroterapisystem är avsett för bruk i elektromagnetisk miljö så som den definieras här nedan. Kunden eller användaren av CEFAR FEMINA-elektroterapisystem ska se till att det används i en sådan miljö.</p>		
Emissionstester	Överensstämmelse	Elektromagnetisk miljö - Riktlinjer
RF-strålning CISPR 11	Grupp 1	CEFAR FEMINA-elektroterapisystem använder RF-energi endast för sin interna funktion. RF-strålningen är därför mycket låg och det är inte troligt att den ska vålla interferens för närliggande elektronisk utrustning.
RF-strålning CISPR 11	Klass B	CEFAR FEMINA-elektroterapisystem är lämpligt för användning i alla anläggningar, inklusive hemmiljö, och de som är direkt anslutna till det offentliga lågspänningsnätverk som förser byggnader som används för hushållsändamål med ström.
Harmonisk strålning IEC 61000-3-2	Ej tillgängligt - använd batteridrift	
Variationer i nätspänning IEC 61000-3-3	Ej tillgängligt - använd batteridrift	




VÄLJ RÄTT ELEKTRODER!

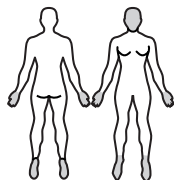

32 mm



50 mm

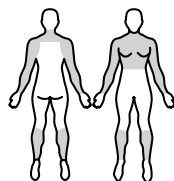

40 x 60 mm



34 x 54 mm




35 x 50 mm



50 x 50 mm



40 x 90 mm

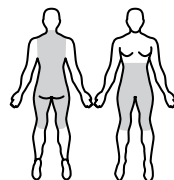


50 x 90 mm



50 x 100 mm








50 x 100 mm

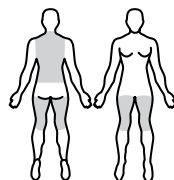

80 x 130 mm



80 x 130 mm

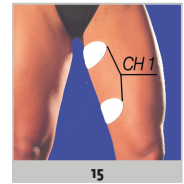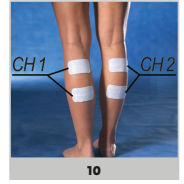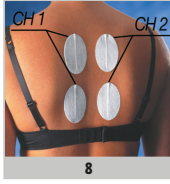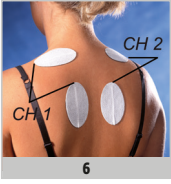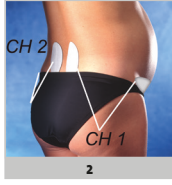

CE 0473



DJO FRANCE
Centre Europeen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre, France



MOTION IS MEDICINE⁺